

Изделия медицинские для забора крови Луэр-адаптер

Производитель: Greiner Bio-One GmbH

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09572 от 21.12.2022

Инструкция по эксплуатации.

Применение: Луэр-адаптеры VACUETTE используются с иглами Луэра или иглами-бабочками и вместе с держателями и вакуумными пробирками VACUETTE применяются для взятия венозной крови. Луэр-адаптеры VACUETTE должны использоваться в соответствии с данной инструкцией.

Описание: Луэр-адаптер VACUETTE имеет на одном конце коннектор типа «Луэр» для присоединения игл Луэра или игл-бабочек, на другом - иглу для прокола крышки вакуумной пробирки, изготовленную из нержавеющей стали и закрытую резиновым клапаном. Перфорированная наклейка на защитном футляре луэр-адаптера VACUETTE действует как знак целостности луэр-адаптера. Луэр-адаптер VACUETTE стерилизован и является одноразовым.

Срок годности и дата производства: указаны на упаковке.

Не используйте луэр-адаптер после истечения срока годности.

Срок годности вскрытой упаковки: срок годности каждого луэр-адаптера соответствует сроку годности, указанному на упаковке.



Меры профилактики и предосторожности

Меры профилактики

- Проверьте луэр-адаптер VACUETTE перед использованием
- Не используйте поврежденный луэр-адаптер VACUETTE
- Луэр-адаптер VACUETTE, загрязненный кровью, считается опасным и подлежит немедленной утилизации в соответствии с правилами медицинского учреждения.
- Запрещается повторное надевание на иглы Луэр снятого защитного футляра
- После окончания процедуры взятия крови сбросьте луэр-адаптер VACUETTE вместе с иглой в контейнер для утилизации.

Меры предосторожности

1. Обращайтесь с луэр-адаптером VACUETTE в соответствии с правилами, принятыми в вашем медицинском учреждении
2. Вирусные гепатиты, ВИЧ и другие инфекционные заболевания могут передаваться через биологический материал. В случае контакта с биологическим материалом необходимо обеспечение соответствующей медицинской помощи.
3. В целях снижения риска заражения проводите процедуру взятия крови в специальных перчатках.
4. Не используйте луэр-адаптер VACUETTE с истекшим сроком годности.

Процедура взятия крови

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЕНЕПУНКЦИИ И ПРИ РАБОТЕ С ПРОБИРКАМИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ!

1. Снимите защитный колпачок с клапанной части луэр-адаптера VACUETTE.
ВНИМАНИЕ: Перфорированная этикетка служит как индикатор целостности луэр-адаптера. Если перфорация разорвана или повреждена, утилизируйте такой луэр-адаптер и возьмите другой.
2. Вкрутите луэр-адаптер VACUETTE перпендикулярно в держатель. Убедитесь, что луэр-адаптер плотно зафиксирован в держателе и не раскрутится во время венопункции.
ВНИМАНИЕ: Неправильное вкручивание луэр-адаптера VACUETTE в держатель может привести к повреждению держателя и последующему выпадению его из держателя во время венопункции.
3. Удерживая держатель в одной руке, другой рукой наденьте иглу-бабочку или иглу Луэр на коннектор луэр-адаптера VACUETTE. Убедитесь, что игла сидит крепко.
4. Выберите место венопункции. Наложите жгут (не более, чем на 1 минуту). Прозеинфицируйте место венопункции. НЕ ПАЛЬПИРУЙТЕ МЕСТО ВЕНЕПУНКЦИИ ПОСЛЕ ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЯ!
5. Снимите с иглы-бабочки или иглы Луэр защитный колпачок.
6. Проведите венопункцию.
7. Вставьте пробирку в держатель и надавите, чтобы игла луэр-адаптера VACUETTE (закрытая клапаном) проколола резиновую часть ее крышки. Помещайте пробирку в центр держателя при прокалывании крышки, чтобы предотвратить прокол ее боковой стенки и преждевременную потерю вакуума.
8. СНИМИТЕ ЖГУТ СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО КРОВЬ НАЧНЕТ ПОСТУПАТЬ В ПРОБИРКУ. ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА СОДЕРЖИМОГО ПРОБИРКИ С КРЫШКОЙ ИЛИ КЛАПАННОЙ ИГЛОЙ ЛУЭР-АДАПТЕРА VACUETTE. Т.е. во время процедуры пробирку нельзя переворачивать, ни при каких обстоятельствах. Для обеспечения правильного наполнения пробирки всегда удерживайте пробирку в держателе, надавливая на ее дно большим пальцем.
9. Как только кровь будет собрана в последнюю пробирку, осторожно извлеките иглу из вены, одновременно прижимая к месту венопункции сухой стерильный ватный тампон до прекращения кровотечения.
10. После образования сгустка наложите на место венопункции повязку либо бактерицидный пластырь.
ВНИМАНИЕ: После венопункции верхняя часть крышки может быть испачкана следами крови. Примите защитные меры для предотвращения контакта с этой кровью во время работы с пробирками.

11. Утилизируйте луэр-адаптер с держателем и иглой в контейнер для утилизации.

Утилизация

Обеззараживание и утилизация луэр-адаптеров с биоматериалом и без биоматериала осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования по обращению с медицинскими отходами» и внутренними протоколами, принятыми в ЛПУ.

Стерилизация

Луэр-адаптеры стерильны. Способ стерилизации: газовая стерилизация окисью этилена. Отметка о способе стерилизации указана на



индивидуальной упаковке и на коробке.

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре 4-25°C (40-77°F).

ВНИМАНИЕ: Избегайте воздействия прямого солнечного света. Превышение максимальной рекомендованной температуры хранения может привести к деформации и повреждению луэр-адаптера.

Транспортируйте луэр-адаптер при температуре от -15°C до +40°C. Луэр-адаптеры, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

Упаковка

В индивидуальном защитном пластиковом чехле, по 100 штук в картонной коробке.

Информация на упаковке.



Срок годности: можно использовать до конца месяца, указанного на упаковке



Номер по каталогу



Номер лота: номер партии



Знак стерильности (газовая стерилизация окисью этилена)



Производитель Greiner Bio-One GmbH



Используйте согласно инструкции



Продукция одноразового использования



Температура хранения